

# MANUEL D'UTILISATION

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez toutes les informations de ce manuel et toute autre documentation incluse dans la boîte avant d'utiliser l'appareil.

## 2. UTILISATION PRÉVUE

L'amplificateur auditif Primoptimum est destiné à compenser une déficience auditive (**presbycusie**) faible à modérée.

Il ne peut pas être utilisé pour des raisons thérapeutiques. En cas de doute il est recommandé de consulter un médecin ORL. Les utilisateurs doivent avoir plus de 36 mois.

## 3. AVERTISSEMENTS

L'aide auditive contient de petites pièces qui peuvent être avalées. Gardez les aides auditives, les piles et accessoires hors de portée des enfants. Si des pièces ont été avalées, consultez immédiatement un médecin.

Une chute, une immersion dans un liquide, des champs électromagnétiques puissants ou une chaleur excessive endommageront l'amplificateur auditif. Si des parties restent dans l'oreille, veuillez consulter un médecin dès que possible, ne le sortez pas par vous-même.

Retirez la batterie pour éviter les fuites si elle n'est pas susceptible d'être utilisée pendant un certain temps.

## 4. MISE EN ROUTE

**(1)** Retirez l'opercule adhésive sur le côté positif de la batterie (batterie zinc-air AG5 ou A13). Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie prévu à cet effet, en veillant à respecter la polarité, le signe + sur la pile et le couvercle doivent être du même côté. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie.

Ne jetez pas Les piles usagées en tant que déchet ordinaire. Elles doivent être jetées selon la gestion du recyclage des piles. Ne pas jeter la pile dans le feu.

## 5. UTILISATION

Allumer : Fermer le compartiment de la batterie

Le volume par défaut (minimum) et le mode d'audition (Standard) sont réglés d'origine.

**(2)** Réglage du volume : volume haut/bas 6 positions (interrupteur à bascule)

Réglage environnement : haut/bas 4 positions (petit bouton)

Éteindre : Ouvrez simplement le compartiment de la batterie (sans la retirer)

**(3)** Pour adapter l'appareil à votre oreille droite ou gauche vous devez monter le tuyau correspondant

Oreille droite marquage sur le tuyau "2B" en rouge

Oreille gauche marquage « 2B » en bleu

Choisir le dôme (bouchon d'oreille) le plus adapté à l'orifice votre oreille et à votre confort d'écoute

Le fixer en l'insérant sur l'embout du tube.

Prenez l'appareil auditif et le positionner sur le contour de votre oreille

le fil de concha (fil de quelques centimètres sur le tube) aide à maintenir fermement le bouchon dans votre oreille. Pour le positionner plier le fil et le positionner sur le contour intérieur de l'oreille.

Ajuster le volume : Pour augmenter le volume, appuyez vers le haut l'interrupteur à bascule

Baisse du volume, appuyez vers le bas l'interrupteur à bascule

Changer le mode d'audition :

Il y a 4 modes différents suivant l'environnement : Standard, Réduction du bruit, intérieur, extérieure, vous pouvez le changer en appuyant sur le bouton Mode. (Petit bouton)

## 6. CONTENU DE LA BOITE

Un appareil principal - deux piles zinc-air AG5 ou A13 - trois bouchons d'oreilles - deux tubes un droit et un gauche - une brosse d'entretien

## 7. AVERTISSEMENT

Ne réglez pas les niveaux de volume trop haut. L'écoute pendant de longues périodes à des niveaux de volume élevés peut causer d'autres dommages auditifs. Si vous vous sentez mal à l'aise, arrêtez d'utiliser.

Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide (tel que la pluie ou la douche...) et/ou de haute température.

Veuillez toujours maintenir votre appareil auditif dans un parfait état. Pour des raisons d'hygiène et pour maintenir la fonctionnalité, nettoyez vos aides auditives tous les jours avec un tissu doux et sec. Nettoyez régulièrement les tubes avec des fils de nettoyage spéciaux. Nettoyez le bouchon d'oreille et le trou du tube collecteur de son afin qu'il ne soit pas obstrué par des corps étrangers, cela affecterait l'effet de l'amplificateur sonore.

N'exposez pas l'amplificateur auditif à une source magnétique, il pourrait être endommagé.

## 8. DÉPANNAGE

Vérifiez les points suivants si l'appareil tombe en panne pendant le fonctionnement.

PROBLÈME	SOLUTION
Pas de son ou son faible	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allumer l'appareil,</li><li>• Retirez et réinstallez la batterie,</li><li>• Remplacer la batterie ; Nettoyer ou remplacer le tube et/ou le bouchon d'oreille</li></ul>
L'appareil émet un signal d'alerte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacer la batterie</li></ul>
Le son est déformé	<ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacer la batterie</li><li>• Diminuer le niveau de volume</li><li>• Nettoyer ou remplacer le tube et/ou le bouchon d'oreille</li></ul>
L'amplificateur auditif ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Contacter le SAV d'AUDIOBOUTIK Au : 04 44 05 28 61</li></ul>

## 9. SPÉCIFICATIONS

Description de l'appareil : Amplificateur auditif numérique

Numéro de modèle

Amplificateur auditif / D162

Type

BTE numérique

Source de courant

D.C.1.5V, batterie AG5

Max. niveau de pression acoustique pour l'entrée SSPL 90dB

122 ± 3 dB

Max. Gain de niveau sonore

50 ± 5 dB

Niveau de bruit d'entrée équivalent

≤20dB

Gain de test de référence

38 ± 5 dB

Valeur de distorsion Harmonique totale

500 Hz ≤ 2%; 800 Hz ≤ 2%; 1600 Hz ≤ 2%;

Gamme de fréquences

300Hz ~ 5000Hz

Température de fonctionnement / humidité:

0 ° C ~ + 40 ° C (32F-104F), ≤ 80% HR

Température de stockage / humidité:

-10 ° C ~ +55 ° C (14F-131F), ≤ 85% HR

Poids (g) : 3.5 (amplificateur d'écoute avec batterie)

Dimension : 40 x 14 x 8 (mm)

## 10. RECYCLAGE

Veuillez mettre au rebut l'appareil conformément à la directive 2002/96 / CE - DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Si vous avez des questions, s'il vous plaît se référer à la réglementation locale.

## 11. GARANTIE


Nous vous offrons une garantie d'un an après la date d'achat. Tout dommage causé par une mauvaise manipulation ne sera pas couvert par la garantie. La batterie et l'emballage sont également exclus de la garantie. Une réclamation de garantie doit être soumise avec le reçu d'achat.



### (1) Insertion de la pile



### (2) Réglage du volume et du mode environnement

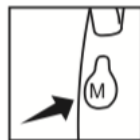


### (3) Montage du tuyau et du bouchon d'oreille

Choisir un des trois bouchons en fonction de l'orifice de l'oreille.

Pour changer le tuyau le dévisser à sa base

(Marque rouge pour oreille droite ; Marque bleu oreille gauche)

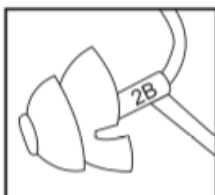



**MANUEL D'UTILISATION**